

Ficha Técnica

IsolanteStyllo

ISOLANTE PARA RESINAS ACRÍLICAS

VERSÃO 01

PRODUTO

IsolanteStyllo – Isolante para resinas acrílicas

INDICAÇÃO DE USO

O ISOLANTESTYLLO é indicado para isolamento de gesso em trabalhos protéticos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para as técnicas convencional e micro-ondas;
- ✓ De fácil aplicação devido a sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes.
- ✓ A espessura é adequada, não causando alterações dimensionais;
- ✓ Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho.

EMBALAGENS

500ml e 1000ml.

COMPOSIÇÃO

Alginato de Sódio, Água deionizada.

INSTRUÇÃO DE USO

- ✓ Nas aplicações, utilizar sempre um pincel limpo para cobrir toda a superfície a ser isolada, com cuidado para não alcançar a parte posterior dos dentes.
- ✓ Quando fizer uso de filme separador na 1ª prensagem, retire e limpe o excesso e aplique o isolante ISOLANTESTYLLO.
- ✓ Usar o modelo de gesso previamente hidratado.



Ficha Técnica

IsolanteStyllo

ISOLANTE PARA RESINAS ACRÍLICAS

VERSÃO 01

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Agitar antes de usar;
- ✓ Manter o frasco fechado;
- ✓ Conservar ao abrigo de luz e calor;
- ✓ Manter fora do alcance de crianças;
- ✓ Evitar contaminação com resíduos de gesso ou resina;
- ✓ Não inflamável.
- ✓ Evitar contato com a pele e com os olhos;
- ✓ Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- ✓ Em caso de irritação ou ingestão procure auxílio médico.
- ✓ Após o uso manter o frasco sempre bem fechado.

REGISTRO DA ANVISA Nº:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291

CNPJ(MF):21.738.250/0001-01 Distribuído por TCL
Química - ME - Rod. SP 225 Sentido Pirassununga a
Aguai, Vicinal Ricieri Scatolini S/N Retiro Campo Alto
CEP: 13644-899-Pirassununga SP CNJ:34.741.612/0001-57
Indústria Brasileira.